



ANIGEN RAPID CPV/CCV/GIARDIA AG TESTKIT

Schnelltest zum qualitativen Nachweis von CPV-, CCV- und Giardia-Antigenen im Kot von Hunden

Testprinzip

Anigen Rapid CPV/CCV/Giardia Ag ist ein chromatographischer Immunoassay Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Parvovirus-, Coronavirus- und Giardia-Antigenen in Hundekot.

Auf der Vorderseite der Anigen Rapid Testkarte befinden sich zwei Buchstaben, die den Testbereich („T“) und den Kontrollbereich („C“) markieren. Wird die Testung korrekt durchgeführt, erscheinen bis zu zwei Linien im Ergebnisfenster der Testkarte. Testlinie und Kontrolllinie sind vor dem Auftragen von Proben nicht sichtbar. Die Kontrolllinie zeigt an, dass der Test ordnungsgemäß ausgeführt wird. Die Kontrolllinie muss jedes Mal erscheinen, wenn der Test durchgeführt wird. Wenn die Zielantigene in der Probe vorhanden sind, erscheint eine violette Testlinie im Ergebnisfenster.

Auf folgende Antigene kann mit dem CPV/CCV/Giardia Ag Test Kit getestet werden:

- Parvovirus-Antigene
- Coronavirus-Antigene
- Giardia-Antigene



Produkteigenschaften

- Zur Anwendung bei Verdacht auf Infektion mit Parvoviren, Coronaviren oder Giardien
- Kombiset - 3 Tests in einem
- Testresultate in nur 10 Minuten
- hohe Sensitivität und Spezifität
- Lagerung bei Raumtemperatur

Service und Vertrieb

PHARMADOC

PHARMADOC GmbH
Hauptstr. 27 f
23923 Lüdersdorf
Bestell-Hotline: 038821 - 620 20

Medizinisch-Wissenschaftliche Abteilung:
Tel.: 03671 - 35 71 46



ANIGEN RAPID CPV/CCV/GIARDIA AG TESTKIT

Testdurchführung

1. Alle Reagenzien und die Proben müssen vor der Anwendung Raumtemperatur angenommen haben (15 - 30 °C).
2. Sammeln Sie die Stuhlprobe mit den 2 mitgelieferten Einwegtupfern.
3. Setzen Sie die Tupfer in beide Gefäße (G und P) mit der Verdünnung ein und vermischen Sie die Stuhlprobe mit der Flüssigkeit, bis sie sich komplett aufgelöst hat (benötigt ca. 10 Sekunden).
4. Warten Sie etwa 1 Minute, bis sich die größeren Partikel abgesetzt haben.
5. Entnehmen Sie eine Testkarte der Folienverpackung und legen Sie sie auf eine ebene, trockene Oberfläche.
6. Entnehmen Sie mit je einer Einwegpipette verdünnte Probe aus den beiden Verdünnergefäßen.
7. Lassen Sie 4 Tropfen der verdünnten Probe senkrecht nacheinander frei in jedes der Probenauftragsfelder (S) fallen. Berühren Sie dabei mit der Pipettenspitze nicht die Testkarte.
8. Starten Sie die Zeitnahme. Die Probenflüssigkeit fließt durch die Testkarte und passiert dabei das Ergebnisfenster. Sollten Sie innerhalb 1 Minute keine Flüssigkeitsfront im Ergebnisfenster der Testkarte erkennen können, fügen Sie einen weiteren Tropfen Probenflüssigkeit in das Probenauftragsfeld hinzu.
9. Interpretieren Sie das Testresultat nach 5-10 Minuten. Lesen Sie das Ergebnis nicht später als nach 20 Minuten ab.



Interpretation der Resultate


1. Negatives Ergebnis

Nur die Kontrolllinie (C) erscheint im Ergebnisfenster.





2. Positives Ergebnis

Das Vorhandensein zweier farbiger Linien in **einem oder mehreren** Ergebnisfenstern (T und C) entspricht dem Nachweis des jeweiligen Antigens.

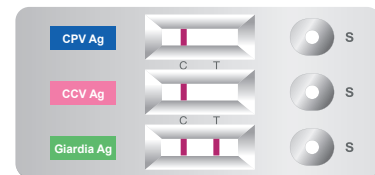

3. Ungültiges Ergebnis

Wenn die Kontrolllinie (C) nicht erscheint, ist das Testergebnis nicht zu verwerten. Wiederholen Sie den Test unter genauer Beachtung der Anleitung.

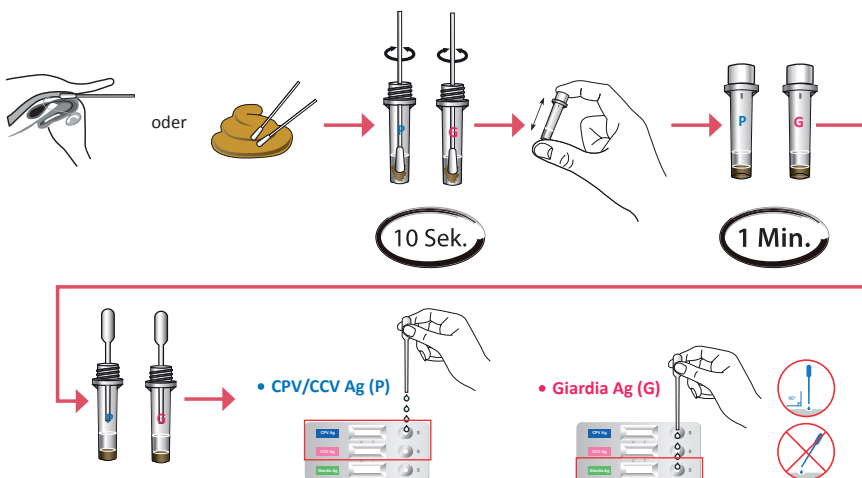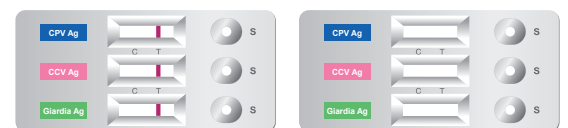

Mitgeliefertes Material (5 Tests/Kit)

1. 5 Anigen Rapid Giardia Ag Testkarten
2. je 5 Gefäße mit Verdünnung (G und P)
3. 10 Einwegtupfer
4. 10 Einwegpipetten
5. 1 Gebrauchsanleitung

Benötigtes, nicht mitgeliefertes Material

1. Stoppuhr