

ANIGEN RAPID FCoV AB TESTKIT **Evaluierung**

Interne Evaluierung für FCoV Ab

Testkit

1) Anigen Rapid FCoV Ab Testkit

Charge	Herstellungsdatum	Ablaufdatum
T2203015	2. Juni 2008	1. Juli 2009

Proben

Die 149 felines Proben wurden zufällig aus Katzen mit klinischen Symptomen in Tierkliniken gesammelt. Alle Proben wurden mit dem Anigen Rapid FCoV Ab-Testkit und dem IFA (Immunofluorescent-Antikörpertest) getestet.

Ergebnisse

1) 51 positive Ergebnisse bei IFA

	Anigen Rapid FCoV Ab		Sensitivität
	positiv	negativ	
IFA	49	2	$49/51 \times 100 \% = 96 \%$

2) 98 negative Ergebnisse bei IFA

	Anigen Rapid FCoV Ab		Spezifität
	positiv	negativ	
IFA	2	96	$96/98 \times 100 \% = 97,9 \%$

Zusammenfassung

149 Proben wurden mit IFA und Anigen Rapid FCoV Ab Testkits getestet. Die Ergebnisse der IFA zeigten 51 positive und 98 negative Proben. Das Anigen Rapid FCoV Ab Testkit zeigte eine hohe Sensitivität und Spezifität von 96% bzw. 97,9 % im Vergleich zu IFA.

Service und Vertrieb

PHARMADOC GmbH · Hauptstr. 27 f 23923 Lüdersdorf

Bestell-Hotline: 038821 - 620 20

Medizinisch-Wissenschaftliche Abteilung: Tel.: 03671 - 35 71 46

PHARMADOC

Bionote_FCoV_Ab_Evaluierung_DE_2018-06-15_V2