



## Mitgeliefertes Material

### URIT-12 Messgerät (Art.-Nr.: UR-URIT-12)


1. Etui
2. Gebrauchsanweisung
3. URIT-12 Messgerät
4. Lanzettiergerät

### H12 Teststreifen (Art.-Nr.: UR-H12)

5. Codechips (3 Stück; Pferd, Hund, Katze)
6. Teststreifendosen (2 Stück)
7. Teststreifen (2 x 25 Stück)
8. Kapillarpipetten (50 Stück)

**⚠ Achtung:** Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des URIT-12 Messgerätes sowie die Packungsbeilage der H12 Teststreifen sorgfältig durch, bevor Sie das URIT-12 Hämoglobin-Messgerät verwenden.

## Durchführung einer Messung

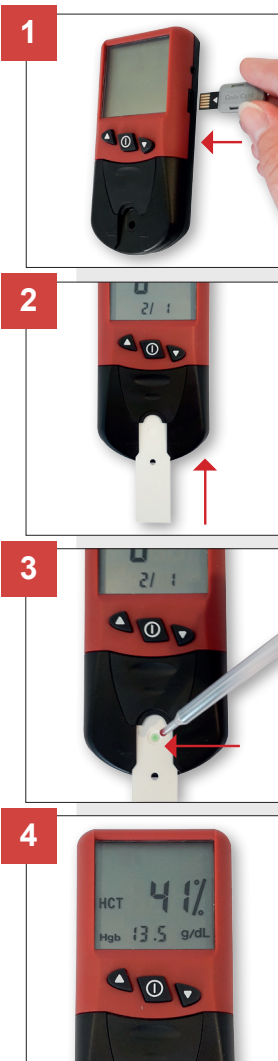

### 1. Den richtigen Codechip wählen und einsetzen

- Den passenden **Codechip (Hund, Pferd oder Katze)** in den Codeschlitz auf der **rechten Seite** des Messgerätes einsetzen
- **EIN-/AUS-Taste** drücken um das Messgerät einzuschalten
- Tier-Code (c = Katze, d = Hund oder h = Pferd) wird auf dem Display angezeigt
- Messgerät schaltet sich anschließend automatisch aus
- Codechip entnehmen und aufheben

### 2. Einen Teststreifen einsetzen

- Teststreifen mit dem **gekerbten Ende** zuerst und den **beiden Löchern** nach oben in den Streifenhalter einführen
- **Eingekerbtes Ende** auf der Oberseite des Streifens darf **nicht mehr sichtbar** sein
- **Blutprobensymbol** leuchtet oben links im Display auf

### 3. Probe entnehmen und auftragen

- Vor der Entnahme die Entnahmestelle leicht **massieren**
- **Probenmaterial** Kapillarblut oder venöses EDTA Blut **13 - 15 µL**
- Blutprobe mit der Pipette durch Kapillarwirkung ansaugen lassen und durch Drücken des **Ballons** auf Testfeld auftragen

### 4. Ergebnis ablesen und Materialien entsorgen

- Das **Testergebnis** (Hämoglobinwert in g/dL und berechneter Hämatokritwert in %) wird in weniger als 30 Sekunden angezeigt und automatisch gespeichert
- **Abfall** streng gemäß den örtlichen Anforderungen entsprechend entsorgen
- Bis zu **250 Ergebnisse** können gespeichert werden